



CATALOG

injection

Professional


ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ИНЪЕКЦИОННАЯ  
КОСМЕТОЛОГИЯ

2019

# PMG

professional medical group

PMG GROUPS®

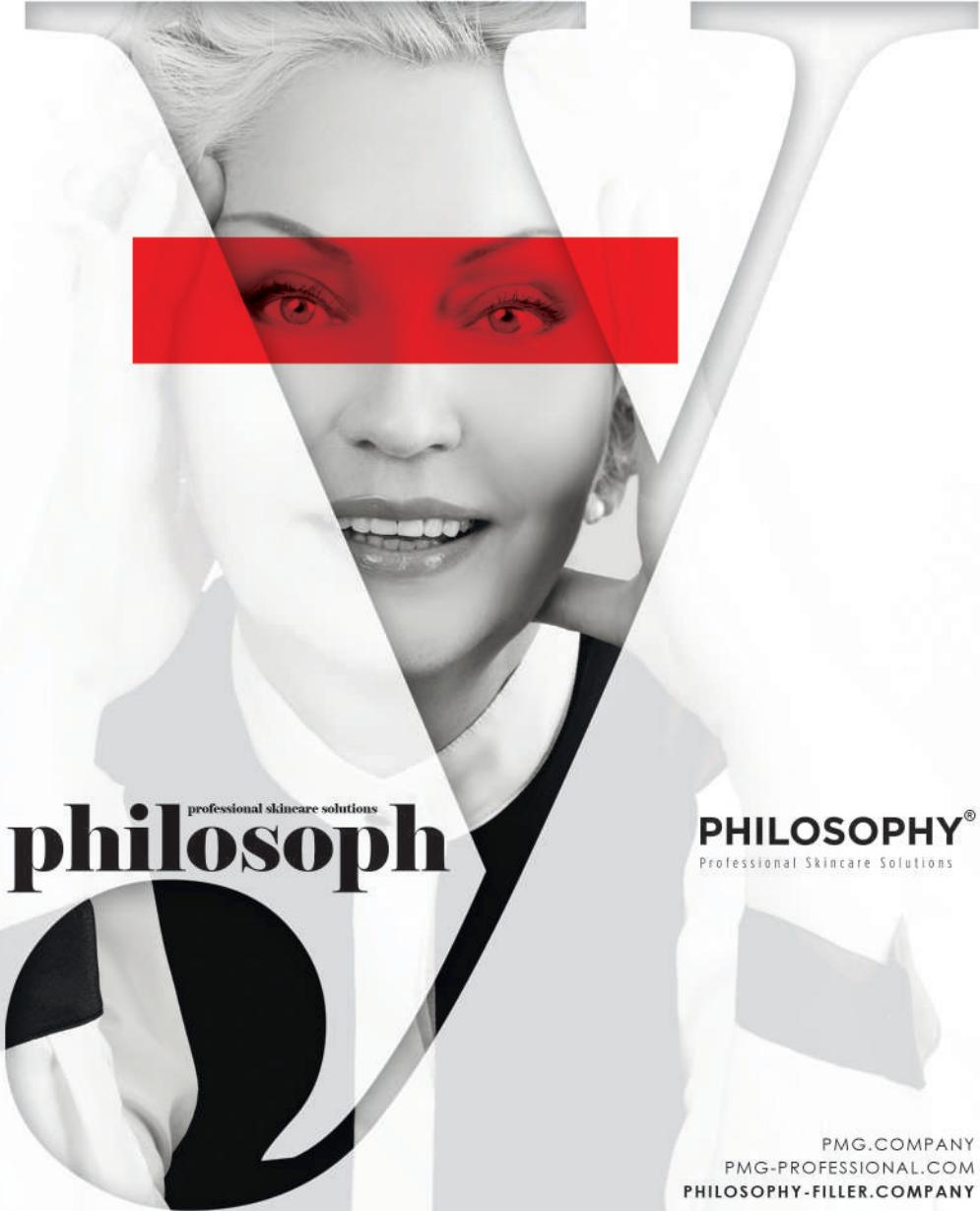

**philosophy**  
professional skincare solutions

**PHILOSOPHY®**  
Professional Skincare Solutions

PMG.COMPANY  
PMG-PROFESSIONAL.COM  
PHILOSOPHY-FILLER.COMPANY

# СОДЕРЖАНИЕ


Препараты для мезотерапии	4
Mesotherapy Eyes	7
MelanoStop	9
<b>НОВИНКА BOTULIFT BIOVECTOR, BIO CASCAD</b>	10
Препараты для биоревитализации	11
Биоревитализант HYDRO ACTION	14
Филлеры на основе полинуклеотидов POLYDERM N	16
Жидкие мезонити Fluid Thread	18
Многокомпонентный метаболический комплекс REGULATOR FORTE	20
Биорегенеранты с антиоксидантами PHILOSOPHY™	22
Препараты BIO CARCASS	24
Филлеры с маннитолом SOLIDERME	26
Филлеры DIAMONDS	28
Филлер PHILOSOPHY™ Labiaderm	30
Центрифуга PHILOSOPHY™	32
Специализированные пробирки для PRP-терапии	33
<b>НОВИНКА ПОЛИНУКЛЕОТИД POLYDERM</b>	34
Крем для кожи с анестезирующим эффектом Lightfrost™	35
Протоколы процедур PHILOSOPHY™	36
Свойства и характеристики препаратов PHILOSOPHY™	38
Сертификаты	39
Клинические исследования препаратов PHILOSOPHY™	40
Статья «Коррекция ложной прогнатии подбородка с помощью филлеров Diamonds»	41

# MESOTHERAPY



## PHILOSOPHY®

Professional Skincare Solutions

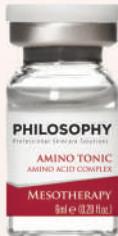

REVITA DERM	AMINO TONIC	DMAE 3%
ПОКАЗАНИЯ		
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ		
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Лечение биологического и фотостарения</li> <li>➤ Биоревитализация</li> <li>➤ При снижении тонуса</li> <li>➤ Сухая и обезвоженная кожа</li> <li>➤ Улучшает кожу и цвет лица</li> <li>➤ Восстановление кожи после химических пилингов и пластических операций</li> <li>➤ Особенно эффективен для пациентов с нормальной и тонкой кожей</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Профилактика и коррекция возрастных изменений кожи</li> <li>➤ Гидратация дермы, биоревитализация</li> <li>➤ Кожа «курильщика», выраженные мимические морщины</li> <li>➤ Уход за кожей со средними и глубокими морщинами; с выраженным признаками фото- и хроностарения</li> <li>➤ Снижение эластичности и тургора кожи</li> <li>➤ Восстановление цвета кожи, реструктуризация кожной ткани</li> <li>➤ Аlopеция, подготовка к контурной пластике</li> <li>➤ Подготовка и реабилитация при пластических операциях</li> <li>➤ При срединных и глубоких пилингах</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Регулирует процессы репарации кожи</li> <li>➤ Увеличивает упругость кожи</li> <li>➤ Оказывает антирадикальное и антилипофусцидное действие</li> <li>➤ Устраняет дряблость кожи, пигментации</li> <li>➤ Имеет мощный эффект лифтинга, устраниет избыток кожи на лице</li> <li>➤ Идеален для пациентов с гравитационным птозом</li> <li>➤ Устраняет воспалительные элементы на коже</li> <li>➤ Незаменимое средство в комплексной терапии стрий, атрофических рубцов и постакне</li> <li>➤ Дает эффект укрепления и подтяжки кожи</li> </ul>
Гиалуронат натрия 1% (1,5млн.ДА), хондроитин сульфат натрия, L-карнозин, L-лейцин, L-лизин, L-метионин, L-орнитин, L-фенилаланин	Гиалуронат натрия 1%, глицин, аланин, тирозин, цистеин, треонин, валин, орнитин, пролин, гистидин, аспарагиновая кислота, триптофан, фенилаланин, изолейцин, лейцин, глутаминовая кислота, метионин, лизин, серин	2-диметиламиноэтанол, гиалуронат натрия 0,5% (250-300 кДА), тартаровая кислота, органический кремний 0,5%
ФОРМА ВЫПУСКА		
Стеклянный флакон 6 мл. с резиновой пробкой и дополнительным защитным колпачком.	Стеклянный флакон 6 мл. с резиновой пробкой и дополнительным защитным колпачком.	Стеклянный флакон 6 мл. с резиновой пробкой и дополнительным защитным колпачком.

MESOTHERAPY®



DRAINAGE	ACNE TREATMENT	LPO COMPLEX	MESO HAIR
<b>ПОКАЗАНИЯ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Улучшение микроциркуляции</li> <li>➤ Сосудорасширяющее и лимфодренажное действие</li> <li>➤ Снабжение тканей кислородом и вывод продуктов метаболизма</li> <li>➤ Профилактика образования грыж, устранение синдрома темных кругов при введении в акупунктурные точки</li> <li>➤ Укрепляет стенки сосудов</li> <li>➤ Купероз, телеангиэктазия</li> <li>➤ Венозная недостаточность, варикозное расширение вен</li> <li>➤ Симптом «усталых ног»</li> <li>➤ Отечности на лице, теле: посттравматические и постхирургические</li> <li>➤ Устранение климактерического горба</li> <li>➤ Антиоксидантная защита</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Жирная или комбинированная кожа, возможно, с участками шелушения, закрытые комедоны</li> <li>➤ Воспалительные папулы</li> <li>➤ Застойные поствоспалительные пятна (постакне)</li> <li>➤ Повышение местного иммунитета</li> <li>➤ Уменьшение себореи</li> <li>➤ Стимулирует действие других противовоспалительных средств</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Состояния кожи по типу «апельсиновой корки»</li> <li>➤ Лечение целлюлита</li> <li>➤ Комплексная программа коррекции веса и фигуры</li> <li>➤ Локальные жировые отложения</li> <li>➤ Плотные жировые отложения в области бедер</li> <li>➤ Коррекция овала лица, «второго подбородка»</li> <li>➤ Неровности кожи после липосакции</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Выпадение волос: гормональное или наследственное, связанное с усталостью, стрессом, беременностью или сезонностью</li> <li>➤ Профилактика, лечение волос и кожи головы после приема антибиотиков</li> <li>➤ Обезвоженные волосы, профилактика для тонких волос</li> <li>➤ Ломкость, сухость, перхоть, зуд кожи головы, себорейный дерматит, алопеция</li> <li>➤ Питает кожу головы</li> <li>➤ Восстанавливает луковицу, фолликулы</li> <li>➤ Стимулирует рост новых волос и увеличивает продолжительность их жизни</li> </ul>
<b>ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ</b>			
Рутин, экстракт мелилотов, экстракт гinkgo билоба, экстракт зеленого чая, экстракт центеллы азиатской, кремний	Аскорбиновая кислота, глюконат цинка, глюконат меди, декапептид-3, трипептид меди, ниацинамид, витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12, гиалуронат натрия	Фосфатидилхолин 5%, дезоксихолат натрия 2.5%, рибофлавин, органический кремний 0.5 - 1%, фолиевая кислота, витамин C, витамин H (биотин), витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12	Гиалуронат натрия 0.2%, миоинозитол, L-глицин, L-аланин, L-аспарагиназа, L- цистеин, L-гистидин, L-глутаминовая кислота, L-изолейцин, витамин C, фолиевая кислота, витамин H (биотин), витамины B1, B2, B3, B5, B6, B12
<b>ФОРМА ВЫПУСКА</b>			
Стеклянный флакон 6 мл. с резиновой пробкой и дополнительным защитным колпачком.			



# NEW PHILOSOPHY®

Professional Skincare Solutions



MESOTHERAPY  
—eyes

# MESOTHERAPY


eyes



**СОСТАВ:** ЦИТРАТ БУФЕРНЫЙ СОЛЕВОЙ РАСТВОР,  
НИАЦИНАМИД (> 0,5%), ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ (0,3%),  
ДИПЕПТИД-2 (> 20 РММ), АЦЕТИЛАТЕРАПЕПТИД-5 (> 20 М.Д.)

#### ДЕЙСТВИЕ:

- \* осветление кожи вокруг глаз
- \* устранение синяков и мешков под глазами
- \* повышение тургора кожи вокруг глаз
- \* дренажный эффект
- \* защита клеток кожи от воздействия UV-лучей
- \* улучшает микроциркуляцию крови и подтягивает кожу, придавая ей гладкость, эластичность и упругость.

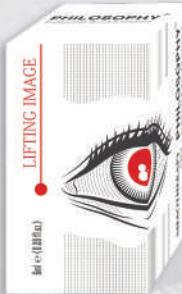

**LIFTING IMAGE**  
6 ml (0.20 fl.oz.)

РАСПАХНУТЫЙ, СИЯЮЩИЙ ВЗГЛЯД! ВАШЕ ЛИЦО ВЫГЛЯДИТ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ МОЛОЖЕ! СРАЗУ ПОСЛЕ ПЕРВОЙ ПРОЦЕДУРЫ КОЖА ВЕК ПОДТЯГИВАЕТСЯ! ЛИНИЯ БРОВИ ПОДНИМАЕТСЯ, "ГУСИННЫЕ ЛАПКИ" РАЗГЛАЖИВАЮТСЯ.

**СОСТАВ:** ЦИТРАТ БУФЕРНЫЙ СОЛЕВОЙ РАСТВОР, ГИАЛУРОНАТ НАТРИЯ (0,3%), ARGIRELINE (> 20 РММ), ПЕНТАПЕПТИД-18 (> 20 М.Д.)

#### ДЕЙСТВИЕ:

- \* увлажнение и подтяжка кожи век,
- \* устранение морщин и "гусиных лапок"
- \* выраженный лифтинг и укрепление кожи вокруг глаз
- \* устранение отечности и мешков под глазами
- \* выравнивание рельефа кожи
- \* усиление крово- и лимфотока.

#### ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР ПРЕПАРАТОВ VISION И LIFTING IMAGE

Техника введения: напажд, микропапульная, линейная  
Глубина 1-2 мм, игла 30-32g



# MESOTHERAPY

НОВИНКА ВЕСНА 2019

**PHILOSOPHY®**  
Professional Skincare Solutions



ДЕПИГМЕНТИРУЮЩИЙ  
ПЕПТИДНЫЙ МЕЗОКОКТЕЙЛЬ  
С ОСВЕТЛЯЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

#### Описание:

Эффективная и инновационная формула сочетает в себе два активных ингредиента для осветления кожи и нормализации тона кожи, содержит ингибитор тирозиназы и ингредиент, который замедляет передачу меланина.

Ниацинамид (витамин В3) влияет на пигментацию кожи путем регулирования передачи по меланосомам от меланоцитов к кератиноцитам меланина без ингибирования активности тирозиназы или пролиферации клеток, а также может мешать клеточному сигнальному пути между кератиноцитами и меланоцитами, что приводит к угнетению меланогенеза.

Чтобы получить оптимальные результаты для осветления кожи, концентрация 5% этого витамина поддерживается в формуле пептидом, что приводит к снижению количества тирозиназы и ингибированию активации меланоцитов.

В составе препарата, гиалуроновая кислота, которая усиливает гидратацию.

#### Состав:

Ниацинамид (5%), Гиалуронат натрия (0,3%), Тетрапептид-30

#### Действие:

Отбеливание, коррекция пигментации, антиоксидантное действие;  
Блокирование синтеза тирозиназы; Замедление синтеза меланина;  
Улучшение и выравнивание тона кожи.

Курс: 10 процедур, 1 раз в 7 дней, затем одна поддерживающая процедура в месяц

Дозировка: 2 мл лица, 1 мл шея, 2 мл декольте, 1 мл руки

Глубина введения: субдермально, папулы, наплаж

**BIOVECTOR™**

1 ML

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА КОНФЕРЕНЦИИ

**НОВИНКА 2019**

## **ROYAL BEAUTY 19.08**

### **BOTULIFT BIOVECTOR™**

ФОРМА УПАКОВКИ: ШПРИЦ 1 МЛ

Усовершенствованная формула омоложения позволяет эффективно бороться с возрастными изменениями кожи. **BOTULIFT BIOVECTOR** создает под кожей «каркас», который питает, придает тонус и свежесть коже, а также разглаживает морщины и рубцы после Акне.



#### **Показания:**

- Увядание кожи;
- Сухая кожа;
- Шрамы постакне;
- Мелкие морщины и глубокие морщины около глаз, лба и носогубного треугольника;
- Обвисание кожи в проблемных местах.

**PM GROUPS®**



#### **Состав:**


- Цитратный буферный солевой раствор
- Гиалуронат натрия (0,8%)
- Аргирелин
- Пентапептид-18

## **ANTI-AG**

#### **Действие:**

- Общее омоложение кожи;
- Улучшение упругости кожи;
- Глубоко увлажняет кожу;
- Способствует активации микроциркуляции кожи;
- Подтягивает овал лица;
- Сглаживает глубокие морщины и подтягивание кожи;
- Улучшение структуры кожи.

**bio CASCAD**  
*for professional trichology*

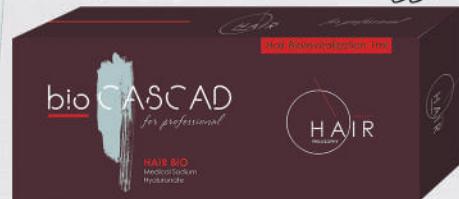

**Форма выпуска:**  
шприц 1 мл

**Упаковка:**  
3 шприца \* 1мл

**HAIR BIO**  
Medical Sodium  
Hyaluronate

#### **HAIR BIOACTIVATOR**

Биоактиватор для увеличения роста волос и восстановления волоссянных фолликул.

Эффективная и инновационная формула пептидного комплекса создана специально для увеличения роста густых и здоровых волос, одновременно уменьшая апоптоз (запрограммированную гибель клеток).

#### **Показания:**


- сильное выпадение волос
- повреждение структуры волос
- тусклый цвет
- некоторые виды мужской и женской алопеции
- тонкие, ломкие, редеющие волосы
- сухая себорея

#### **Действие:**

- активация волоссяные («спящие») фолликул
- нормализация обменных процессов
- предупреждение преждевременного выпадения волос
- способность ускорения роста волос
- активизация кровоснабжения кожи головы
- увлажнение и питание кожи головы

**Состав:**

Гиалуронат натрия (0,8%), Фосфатный буферный раствор, Пептид меди Декапептид-18, Биотиноли трипептид-1, Ацетил тетрапептид-3

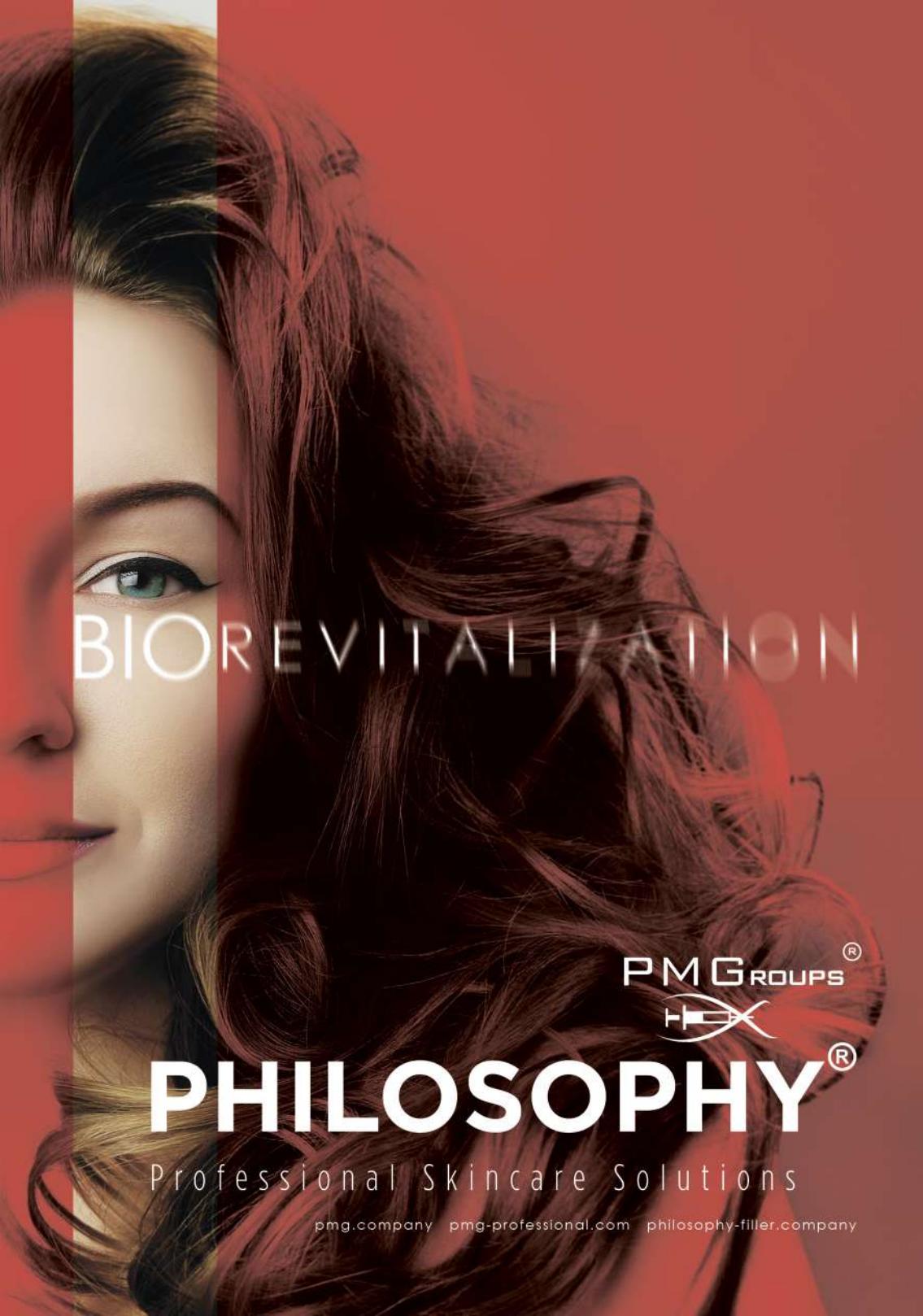A close-up photograph of a woman's face and hair. The left side of the image is a warm-toned portrait of her eye and forehead. The right side shows her dark, wavy hair against a solid red background.

BIOREVITALIZATION

PMG GROUPS®  
HX

PHILOSOPHY®

Professional Skincare Solutions

[pmg.company](http://pmg.company) [pmg-professional.com](http://pmg-professional.com) [philosophy-filler.company](http://philosophy-filler.company)

# BIOREVITALIZATION

PHILOSOPHY<sup>®</sup>



FILOHA 1.6	FILOHA 2.0
ПОКАЗАНИЯ	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Умеренные признаки фото- и хроностарения</li><li>➤ Дегидратация кожи с умеренными признаками старения, мелкоморщинистым типом старения</li><li>➤ Коррекция симптомокомплекса постакне</li><li>➤ Частое и/или длительное посещение солярия</li><li>➤ «Кожа курильщика»</li><li>➤ «Стressовая кожа»</li><li>➤ Подготовка и реабилитация после пластических операций, лазерных шлифовок, пилингов</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Умеренные и выраженные признаки хроностарения кожи</li><li>➤ Коррекция средних и выраженных морщин и складок</li><li>➤ Дегидратация кожи средней и сильной степени этиологии, особенно у пациентов с толстой, пористой кожей</li><li>➤ Коррекция атрофических рубцов (постакне) и стрий</li><li>➤ Подготовка и реабилитация при проведении агрессивных манипуляций</li><li>➤ Подготовка к пластическим операциям и реабилитация после них</li><li>➤ Идеально подходит для мужчин</li></ul>
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ	
Гиалуронат натрия, натрия бикарбонат  Нативная гиалуроновая кислота, концентрация 1.6%, молекулярный вес 3000 кДА	Гиалуронат натрия, натрия бикарбонат  Нативная гиалуроновая кислота, концентрация 2.0%, молекулярный вес 3000 кДА  Содержит немодифицированную гиалуроновую кислоту биоферментативного происхождения



FILOHA 2.7	FILOHA 3.0	FILOHA 3.6
<b>ПОКАЗАНИЯ</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Выраженные признаки хроностарения кожи</li><li>❖ Умеренные возрастные изменения кожи шеи и области декольте</li><li>❖ Возрастные изменения кожи тыльной поверхности кистей рук</li><li>❖ Дряблая кожа внутренней поверхности плеча, предплечья</li><li>❖ Способствует нормализации сбалансированного водного баланса</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Глубокая восстановительная терапия дермы</li><li>❖ Умеренное и выраженное старение кожи в области шеи и декольте</li><li>❖ Подготовка перед биоармированием</li><li>❖ Снижение признаков обезвоживания кожи</li><li>❖ Повышает упругость кожи</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>❖ Глубокая гидратация тканей</li><li>❖ Используется для заполнения морщин и складок</li><li>❖ Потенцирование эффекта контурной пластики и других методов коррекции</li><li>❖ Реабилитация пациентов с элементами посттакне</li><li>❖ Коррекция атрофических рубцов и стрий</li><li>❖ Подготовка кожи к контурной пластики с пролонгированием действия дермальных имплантов на основе гиалуроновой кислоты</li></ul>
<b>ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ</b>		
Гиалуронат натрия, натрия бикарбонат  Нативная гиалуроновая кислота, концентрация 2.7%, молекулярный вес 3000 кДА. Содержит немодифицированную гиалуроновую кислоту биоферментативного происхождения	Гиалуронат натрия, натрия бикарбонат  Нативная гиалуроновая кислота, концентрация 3.0%, молекулярный вес 3000 кДА. Содержит немодифицированную гиалуроновую кислоту биоферментативного происхождения и максимальную концентрацию гиалуроновой кислоты	Гиалуронат натрия, натрия бикарбонат  Нативная гиалуроновая кислота, концентрация 3.6%, молекулярный вес 3000 кДА. Содержит немодифицированную гиалуроновую кислоту биоферментативного происхождения и максимальную концентрацию гиалуроновой кислоты

H  
Y  
D  
R  
O  
C  
A  
N  
T  
I  
C  
O  
N

Идеален для биоревитализации и биоармирования!

# PHILOSOPHY<sup>®</sup>

Professional Skincare Solutions

PMG Groups<sup>®</sup>



10 мл.

стеклянный одноразовый шприц в  
блisterной упаковке

## HYDRO ACTION

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ  
ПРОЛОНГИРОВАННОГО  
ДЕЙСТВИЯ С  
ГЛИЦЕРОЛОМ

Обладает выраженным биоревитализирующим эффектом пролонгированного действия.

Придает и сохраняет естественный объем, способствует глубокому увлажнению.

Эффективен при коррекции микрорельефа, а также в деликатных зонах, стимулирует синтез собственных дермальных структур и осуществляет их укрепление.

0,9% раствор натрия хлорида


20 мг/мл глицерол

18 мг/мл гиалуронат натрия ММ130000

НОВИНКА!

# HYDRO ACTION

БИОРЕВИТАЛИЗАНТ  
ПРОЛОНГИРОВАННОГО  
ДЕЙСТВИЯ С ГЛИЦЕРОЛОМ

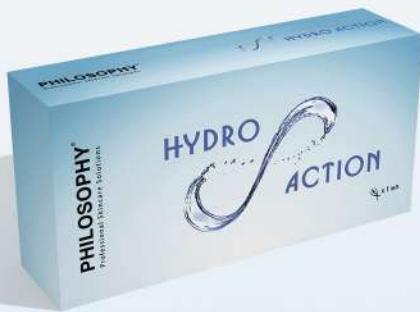

ОБЪЁМ И ФОРМА ВЫПУСКА:

1.0ml

стеклянный одноразовый  
шприц в блистерной  
упаковке

0,9% раствор натрия хлорида

глицерол 20 мг/мл

гиалуронат натрия 18 мг/мл (Mw # 3000 kD)

Глубина введения препарата:  
верхние слои дермы на 2-3 мм.

**PHILOSOPHY®**  
Professional Skincare Solutions

**HYDRO ACTION**

Стерильный гель на основе гиалуроновой кислоты неживотного происхождения является вязкоэластичным, прозрачным, бесцветным, стерильным, апирогенным, полностью биосовместим, предсказуем в работе, при биодеградации не нарушает архитектонику тканей.

Обладает выраженным биоревитализующим эффектом пролонгированного действия. Придает и сохраняет естественный объем, способствует глубокому увлажнению. Эффективен при коррекции микрорельефа, а также в деликатных зонах, стимулирует синтез собственных дермальных структур и осуществляет их укрепление. Идеален для биоревитализации и биоармирования.

## ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ

18 mg/ml + Glycerol, гиалуроновая кислота 18 mg/ml (Mw # 3000 kD) и глицерол 20 mg/ml, который стабилизирует ГК и обеспечивает её вязкость, способствует значительному увеличению длительности действия гиалуроната натрия.

Препарат позволяет воссоздать оптимальную физиологическую среду для стимуляции фибробластов, синтеза гиалуроновой кислоты, коллагена и других компонентов клеточного матрикса.

Глицерол является мощным антиоксидантом, замедляющим окислительные реакции, а также предотвращающий образование свободных радикалов, влияющих на процесс увядания тканей.

## ПОКАЗАНИЯ

- Увядающая кожа, снижение качественных характеристик дермы
- Поверхностные морщины лица, шеи, кистей рук, тела
- Подготовка к проведению срединных и глубоких химических пилингов, дермабразии, лазерной шлифовки
- Подготовка к проведению пластических операций и реабилитации после них

# PHILOSOPHY®

Professional Skincare Solutions

## POLYDERM N


### ФИЛЛЕРЫ НА ОСНОВЕ ПОЛИНУКЛЕОТИДОВ

Препараты POLYDERM - N обеспечивают выраженный результат омоложения за счет множества эффектов, которые они оказывают на кожу:

\*стимулируют процессы репарации и регенерации; \*усиливают метаболические процессы в клетках; \*увеличивают выработку фибрробластами коллагена, эластина, а также неколлагеновых молекул; \*обеспечивают оптимальное увлажнение кожи; \*защитают кожу от ультрафиолетовых лучей типов А и Б; \*абсорбируют и нейтрализуют свободные радикалы; \*ускоряют процессы рубцевания и регенерации кожи.



PMG Groups®

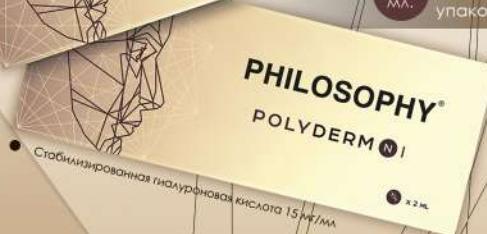

стеклянный одноразовый  
шприц в блистерной  
упаковке

**НОВИНКА!**



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА PDRN

htlxx  
BIOTECHNOLOGY

CERTIFICATE OF ANALYSIS № 170701

PRODUCT NAME	PDRN (Polymer)	Batch No.	170701
MANUFACTURER NAME	htlxx BIOTECHNOLOGY	DATE	17.07.2017
DATE OF EXPIRATION	17.07.2019	TESTS	High molecular weight hyaluronic acid
DATE OF MANUFACTURE	17.07.2017	RESULTS	Pass
TESTS	High molecular weight hyaluronic acid	TESTS	High molecular weight hyaluronic acid
RESULTS	Pass	RESULTS	Pass
Signature	_____ htlxx	Signature	_____ htlxx

## POLYDERM N I

### ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Стабилизированная гиалуроновая кислота 15 мг/мл,  
высокой степени очистки (medical certificate)

Стабилизированная гиалуроновая кислота 20 мг/мл,  
высокой степени очистки (medical certificate)

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

- молекулярная масса – 3000 кДальтон
- pH ~ 7.2
- осмоляльность(мосм/кг) ~ 305
- содержание эндотоксинов (EU/ml) – < 0,50
- остаточный BDDE < 0.05 ppm

- молекулярная масса – 3000 кДальтон
- pH ~ 7.2
- осмоляльность(мосм/кг) ~ 305
- содержание эндотоксинов (EU/ml) – < 0,50
- остаточный BDDE < 0.05 ppm

### ПОКАЗАНИЯ

Ранняя атония кожи, неровность цвета, пористость

Возраст: до 30-35 лет

Мелкоморщинистый тип старения с присущей гравитацией, неровность цвета, расширенные поры, складки, морщины

Возраст: от 30-35 лет

### ГЛУБИНА ИНЪЕКЦИИ

Интрандермально. Глубина ввода препарата от 1-3 мм.  
Возможно введение с помощью иглы или канюли.

Интрандермально. Глубина ввода препарата от 3-5 мм.  
Возможно введение с помощью иглы или канюли.

По своей структуре ПДРН – это фрагменты низкомолекулярных ДНК, которые не вызывают генетической трансформации и являются абсолютно безопасными для организма человека.

Выраженная эффективность ПДРН связана с их способностью замещать «сломанные» азотистые основания связывающих ДНК.

Таким образом, препарат Polyderm-N на основе полинуклеотидов не стимулирует работу старых функциональных структур в коже, а удаляет поврежденные участки клеток, способствует их восстановлению и провоцирует рост молодых функциональных структур.

Препарат POLYDERM – N обеспечивает выраженный результат омоложения за счет множества эффектов, которые он оказывает на кожу:

- Стимулирует процессы reparации и регенерации
- Усиливает метаболические процессы в клетках
- Увеличивает выработку фибробластами коллагена, эластина, а также неколлагеновых молекул
- Обеспечивает оптимальное увлажнение кожи
- Защищает кожу от ультрафиолетовых лучей типов А и Б
- Абсорбирует и нейтрализует свободные радикалы
- Ускоряет процессы рубцевания и регенерации кожи



Состав:  
Гиалуроновая кислота  
10 мг/мл (Mw 1.9-2.0 млн Да)  
Флакон:  
6 мл.

PHILOSOPHY<sup>®</sup>  
Professional Skincare Solutions

Современная и эффективная  
антивозрастная процедура,  
которая стимулирует синтез  
коллагена.

Именно благодаря этому и  
достижется омолаживающая и  
подтягивающий эффект!

# Fluid THREAD

жидкие мезонити



**НОВИНКА!** ЖИДКИЕ МЕЗОНИТИ  
**FLUID THREAD**  
**PHILOSOPHY®**



Гиалуроновая кислота 10 мг/мл  
(Mw 1.9-2.0 млн Да)

**Аминокислотный состав:**  
аргинин, лизин, фенилаланин,  
орнитин, пролин, метионин,  
глютамин.

**Элементный состав:**  
магний, медь, цинк, кальций,  
марганец.



Жидкие нити вводятся дермально,  
не менее, чем на 4 мм, либо в  
подкожно-жировую клетчатку с  
помощью иглы или канюли.



6.0 мл

### ЖИДКИЕ МЕЗОНИТИ FLUID THREAD –

современная и эффективная антивозрастная  
процедура, которая стимулирует синтез коллагена.

Именно благодаря этому и достигается  
омолаживающий и подтягивающий эффект.



#### ЖИДКИЕ МЕЗОНИТИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ:

- Эстетических недостатках кожи
- Возрастных морщинах
- Обезвоживании кожного покрова
- Чрезмерной пигментации
- Изменении контура лица
- Слабом тонусе
- Носогубных складках
- Восстановлении после проведенной пластики



**ANTI-AGE**  
РЕВИТАЛИЗАЦИЯ + БИОЛИФТИНГ  
+ СИЯНИЕ =  
*Совершенство*



ОРИГИНАЛЬНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
**REGULATOR FORTE™**

# REGULATOR FORTE™

16 АМИНОКИСЛОТ

13 ВИТАМИНОВ


ПЕПТИДЫ

ФОРМА ВЫПУСКА:  
шприц, флакон



## ПОКАЗАНИЯ

- Обеспечивает более длительный результат коррекции (пролонгированный эффект глубокого увлажнения)
  - Запускает процесс эндомодуляции кожи
  - Увеличивает уровень и продолжительность гидратации кожи (ГК очень гигроскопична и обладает способностью связывать и удерживать воду)
  - Интенсивная ревитализация
  - Восстановление упругости, эластичности, тонуса
  - Лифтинг
  - Клеточная реструктуризация дермы, эпидермиса и подкожной жировой клетчатки
  - Коррекция овала
  - Сияние кожи и осветление пигментации
  - Выравнивание микрорельефа кожи, стимулирует обмен веществ и запускает процесс регенерации
  - Обладает антиоксидантным действием
- 
- Папульная техника-вводится в дерму, формируя папулы диаметром 3-4 мм. Применима в зонах шеи, декольте, рук и околоорбитальной зоны.
  - Глубина введения иглы: 0,4 мм
  - Продолжительность курса:  
В среднем составляет 3-6 месяцев, при проведении не менее 3 процедур с интервалом в 10 дней.

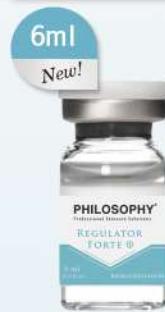

Выгодный  
объем!

## REGULATOR FORTE

⊕  
Концентрация  
20 мг/мл

### Техника введения препарата:

- Линейно-ретроградная техника (вводится вдоль условно расположенных массажных линий на расстоянии 0,5 см. друг от друга. Применима в области лица и шеи).
- Векторный лифтинг-вводится путём приложения от 3 до 5 разнородных векторов вдоль линий максимального натяжения. Применима в области лица и зоны декольте.



БИОМОЛОЖЕНИЕ

# PHILOSOPHY®



УВЛАЖНЕНИЕ

ОЧИЩЕНИЕ  
КОЖИ НА  
КЛЕТОЧНОМ  
УРОВНІ

ЭЛАСТИЧНОСТЬ  
КОЖИ

УПРУГОСТЬ  
КОЖИ


МОЩНЫЕ  
АНТИ-  
ОКСИДАНТНЫЕ  
СВОЙСТВА

НОВИНКА!

# ИДЕАЛЬНЫЙ БИОРЕГЕНЕРАНТ™ с антиоксидантами



UA.TR.039.371

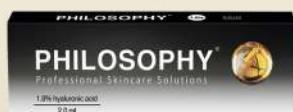

## ПОКАЗАНИЯ

- Способствует длительной гидратации
- Улучшает цвет лица
- Способствует быстрой регенерации
- Оказывает антиоксидантный эффект
- Эффективен для профилактики и лечения постакне
- Рекомендован к использованию при подготовке к химическому пилингу, пластическим операциям и другим косметическим процедурам повышенной травматичности

- Заполнение мелких морщин в деликатных зонах: околособирательная, glabella, вокруг рта
- Улучшение цвета и текстуры кожи
- Повышение тургора и эластичности кожных покровов
- Инъекции позволяют избежать возникновения новых морщин
- Препарат推薦ован при атрофии кожных покровов и для подготовки к трецилфтингу

- Обеспечивает биоармирование и выраженный лифтинг кожи
- Возвращает четкость овалу лица
- Уменьшает глубину морщин
- Инъекции препарата позволяют скорректировать возрастные изменения в области носогубного треугольника

## ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Гиалуронат натрия 11 мг/мл, антиоксидант фосфатный буфер 1.6%

Концентрация ГК: 1.1%

pH: 7.3

Молекулярная масса:  
2.5 млн. Да

Гиалуронат натрия 18 мг/мл, антиоксидант фосфатный буфер 1.6%

Концентрация ГК: 1.8%

pH: 7.3

Молекулярная масса:  
2.5 млн. Да

Гиалуронат натрия 22 мг/мл, антиоксидант фосфатный буфер 1.6%

Концентрация ГК: 2.2%

pH: 7.3

Молекулярная масса:  
2.5 млн. Да

## ТЕХНИКИ ВВЕДЕНИЯ

- Папульная (в верхние слои дермы на глубину 2-3 мм и на расстоянии 0,5-1 см от каждой папулы),
- Линейная (игла вводится на всю длину вглубь кожи, а после медленно извлекается и выпускается гель).

## ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА

Необходимо 3-5 процедуры с интервалом 1-2 недели между процедурами. Регулярные процедуры способствуют поддержанию длительного эффекта.





PHILOSOPHY®

# BIO CARCASS



## ECLADERME FACE 14

## ECLADERME NECK 10

### ПОКАЗАНИЯ

- Профилактика и коррекция признаков фото- и биологического старения кожи вокруг глаз, губ и периорбитальной области
- Может применяться для армирования на участках, требующих восстановления упругости, особенно у молодых пациентов
- Омоложение и лёгкое увеличение губ
- Обеспечивает продолжительную гидратацию кожи
- Обладает легким эффектом филлера
- Естественный результат эстетической коррекции
- Восстанавливает плотность и тургор кожи
- Улучшает трофику тканей и активность фибробластов

- Для профилактики и коррекции признаков фото- и биологического старения кожи шеи и декольте
- Может применяться для армирования на участках, требующих восстановления упругости
- Улучшает гидрорезерв кожи, тургор, эластичность, плотность кожи шеи и декольте
- Уменьшает морщины
- Обеспечивает продолжительную гидратацию кожи
- Обладает легким эффектом филлера
- Улучшает трофику тканей и активность фибробластов
- Естественный результат эстетической коррекции

### ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Нестабилизированная гиалуроновая кислота 10 мг/мл  
Стабилизированная гиалуроновая кислота 14 мг/мл

Нестабилизированная гиалуроновая кислота 10 мг/мл  
Стабилизированная гиалуроновая кислота 10 мг/мл



SOLIDERM ВЫСТУПАЕТ БИОРЕВИТАЛИЗАНТОМ

# Mannitolum

SOLIDERM 2 в 1 МОЩНЕЙШИЙ АНТИОКСИДАНТ

# SOLIDERM™

PM GROUPS®  



**SOLIDERM** УНИКАЛЬНЫЙ  
ФИЛЛЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

## SOLIDERM 2 в 1


ОБЪЕДИНИЛ СВОЙСТВА ФИЛЛЕРА И  
СРЕДСТВА ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ



Эффект биоревитализации  
продолжается в течение всего  
действия препарата.

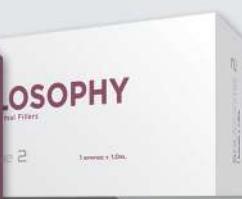

Он замедляет разрушение  
гидролизной кислоты, продлевая  
ее действие, нейтрализует свободные  
радикалы и продлевает молодость кожи,  
безопасный для организма.

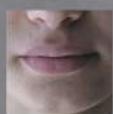

ДО



ПОСЛЕ

CE 1023 ISO 9001 CERTIFIED ISO 13485 CERTIFIED



# ФИЛЛЕРЫ С МАННИТОЛОМ

## SOLIDERME™



SOLIDERME 2	SOLIDERME 4
ПОКАЗАНИЯ	
<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Заполнение морщин, складок и рубцов</li><li>➤ Армирование ткани за счет антиоксидантного действия</li><li>➤ Мимические морщины «марионетки», периоральные морщины (кисеты), носогубная складка</li><li>➤ Увеличение губ</li><li>➤ Ринопластика носа</li><li>➤ Скулы</li><li>➤ Ликвидация темных кругов под глазами</li><li>➤ «Гусиные лапки», морщины височной области</li><li>➤ Морщины лба, межбровья</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Мимические морщины «марионетки»</li><li>➤ Увеличение губ</li><li>➤ Перiorальные морщины (кисеты)</li><li>➤ Носогубная складка</li><li>➤ Скулы</li><li>➤ Морщины височной области</li></ul>

### ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Стабилизированная гиалуроновая кислота 20 мг/мл, маннитол

Стабилизированная гиалуроновая кислота 24 мг/мл, маннитол




# DIAMONDS™

PROFESSIONAL DERMAL FILLERS

PHILOSOPHY®



FINE LINES	DEEP	ULTIMATE	FACE
<b>НАЗНАЧЕНИЕ</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Для тонких, поверхностных морщин</li> <li>❖ Периоральные морщины</li> <li>❖ «Гусиные лапки»</li> <li>❖ Морщины в области лба и межбровья</li> <li>❖ Может использоваться для процедуры биоармирования при мелко-морщинистом типе старения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Для средне-глубоких морщин</li> <li>❖ Коррекция выраженной носогубной складки</li> <li>❖ «Линии марионеток»</li> <li>❖ Моделирование формы и объема губ</li> <li>❖ Может использоваться для процедуры биоармирования</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Для увеличения объема губ</li> <li>❖ Позволяет корректировать глубокие складки и морщины</li> <li>❖ Объемное моделирование подбородка, щек и скул</li> <li>❖ Улучшение контуров и овала лица</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Для ремоделирования контуров лица</li> <li>❖ Восполнение недостающего объема</li> <li>❖ Объемное моделирование подбородка, щек и скул</li> <li>❖ Коррекция глубоких складок и морщин</li> <li>❖ Объем препарата позволяет в одну процедуру получить эффект полной коррекции</li> </ul>
<b>ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ</b>			
Стабилизированная гиалуроновая кислота 18 мг/мл	Стабилизированная гиалуроновая кислота 23 мг/мл	Стабилизированная гиалуроновая кислота 26 мг/мл	Стабилизированная гиалуроновая кислота 26 мг/мл
<b>УРОВЕНЬ ИНЪЕКЦИИ</b>			
Средние слои дермы	Глубокие слои дермы	Супрапериостально, глубокие слои дермы, субдермально	Супрапериостально или глубоко в подкожно-жировую клетчатку
<b>ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ</b>			
6 месяцев	9 месяцев	12 месяцев	18 месяцев

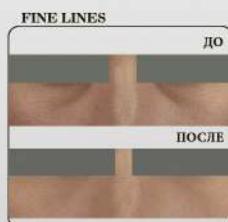

Достижение необходимого эффекта



Необходимый эффект спустя 3 месяца



Необходимый эффект спустя 6 месяцев



Аллергическая реакция



РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
№ РЗН 2016/4758 от 16.09.2016



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ № УАТР 101-270.374-2018



**PHILOSOPHY®**

Professional Skincare Solutions

**LABIADERM™**  
FILLER

**PHILOSOPHY®**

Professional Skincare Solutions

**LABIADERM™**  
FILLER

ФОРМА ВЫПУСКА: 1 шприц x 2 мл

### ПОКАЗАНИЯ

- Препарат для интимной пластики
- Коррекции больших и малых половых губ
- Коррекции точки G, U
- Увеличение увлажнённость путём повышения активности желез
- Коррекция клитора, сужение влагалища
- Недержание мочи у женщин
- Лечение аноргазмии
- Укол оргазма «O-SHOT»
- Интимная пластика у мужчин (увеличение головки полового члена)

### ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Стабилизированная гиалуроновая кислота 23 мг/мл


## LABIADERM INTIM

ЕДИНСТВЕННЫЙ ФИЛЛЕР, предназначенный для коррекции возрастных и эстетических изменений аногенитальной области.

Благополучие сексуальной сферы является одним из самых важных факторов, необходимых для сохранения достойного качества жизни, общего здоровья и психологического комфорта любого человека.

Абсолютно естественно и понятно желание мужчин и женщин иметь качественную интимную жизнь в любом возрасте. Но, как известно, есть масса наследственных и приобретённых факторов: деформации половых органов, функциональных и гормональных изменений и т. д., которые могут отрицательно влиять на сексуальность.

Коррекция интимной зоны (или интимная пластика) при помощи малоинвазивных методик дарит возможность получать больше удовольствия от секса, а значит, существенно повышать его качество.

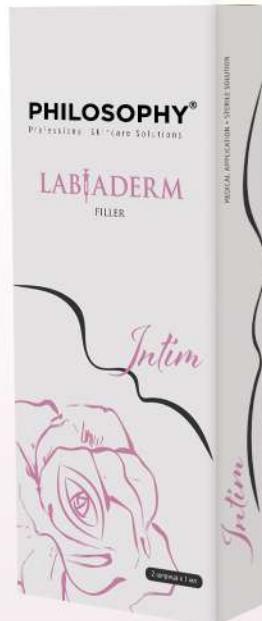

К данному препарату предъявляются самые строгие требования:

- Не имеет антигенных свойств
- Не токсичен
- Апирогенный
- Не мигрирует
- Не вызывает воспалений
- Стабилен
- Прост в применении
- Биосовместим
- Медленно абсорбируется
- Высокая степень очистки
- Мягкость и пластичность
- Полная безопасность
- Остается активным в течение заявленного срока (10-14 мес.)

# ЦЕНТРИФУГА

МОДЕЛЬ 80-1



## ЦЕНТРИФУГА

периодического действия, обычная, переносная с частотой вращения до 4000 оборотов в минуту, применяемой для разделения неоднородных жидких систем в поле центробежных сил.

## ЦЕНТРИФУГА

предназначена для использования в практике клинической лабораторной диагностики и проведения исследований в области медицины у других областях.

## ЦЕНТРИФУГА

обеспечивает центрифугирование жидких систем плотностью не более 2 g/cm<sup>3</sup>.



### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЦЕНТРИФУГИ:

- температура окружающего воздуха от +10 до +35 °C;
- верхнее значение относительной влажности воздуха 80% при +25°С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Центрифуга 80-1
Электрическое питание	220 В, 50 Гц
Частота вращения	0-4000 об/мин
Количество пробирок в роторе	6 шт.
Установленное время вращения	0 - 60 минут.
Максимальная относительная центробежная сила	1790 x g
Габаритные размеры, мм	330x280x270



D  
LATELET  
ICH  
PRP  
LASMA

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД СТИМУЛИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ  
ТКАНЕЙ ОРГАНИЗМА СОБСТВЕННОЙ ПЛАЗМОЙ



Упаковка в блистер  
из фольги (по 4 шт)

## СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОБИРКИ ДЛЯ PRP-ТЕРАПИИ

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- \* травматология / спортивная медицина
- \* эстетическая медицина
- \* трихология



ВОССТАНОВЛЕНИЕ



ОМОЛОЖЕНИЕ



РЕГЕНЕРАЦИЯ

Материал: Боросиликатное  
медицинское стекло

Вакуумная система - автоматический  
забор крови

Объем: 8 мл

Наполнитель: Специальный разде-  
лительный гель.  
Антикоагулянт – цитрат  
натрия 3.8%

ПРОВЕДЕНЫ КЛИНИЧЕСКИЕ  
ИСПЫТАНИЯ НА БАЗЕ КЛИНИКИ  
ФЕОФАНИЯ: БЕЗОПАСНЫ,  
АТОКСИЧНЫ, АПИРОГЕННЫ

# PHILOSOPHY® POLYDERM

ПОЛИНУКЛЕОТИД

3 ml



## POLYDERM MADE IN ITALY

Активные компоненты : Дезоксирибонуклеотид — 20.0 мг/мл (2.0%), нестабилизированная гиалуроновая кислота 20.0 мг/мл (2.0 %)

Защищенная патентом формула содержит гиалуроновую кислоту и комбинацию аминокислот ДНК полученных из молок форели, предшественников коллагена и эластина. Эта комбинация помогает стимулировать регенерацию внеклеточного матрикса, стимулируя кожный биогенез.

Главная цель Polyderm – продление жизненного цикла клеток, восстановление и защита ДНК кожного биогенеза.

**POLYDERM** – мезотерапевтический гель способствует восстановлению клеток, реконструируя соединительную ткань посредством стимулирования процессов reparации, восстанавливает разрушенные протеины [в основном, коллаген], клетки крови, иммунокомпетентные структуры и ткани, поврежденные ишемическими процессами, УФО и свободными радикалами. Оказывая глобальное омолаживающее действие, POLYDERM является идеальным дополнением к мезотерапии, биоревитализации и PRP терапии.

## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ

- ревитализация кожи, особенно деликатные зоны с тонкой кожей (периорбитальная область, шея, кисти рук);
- кисетные морщины;
- подготовительный этап перед агрессивными воздействиями;
- реабилитация кожи;
- терапия фото- и хроностарения;
- коррекция гиперпигментаций;
- создает эффект увлажненных, припухлых губ, придает легкий объем;
- усиление барьерных свойств и восстановление иммунитета кожи ;
- увлажнение, в том числе губ.

## Как действует гель POLYDERM?

Благодаря воздействию комплекса POLYDERM на кожу процесс возрастной дегенерации кожи устойчиво замедляется, и достигается прогрессивное улучшение общего состояния кожи. Сочетание ДНК (Дезоксирибонуклеотидов) и гиалуроновой кислоты обеспечивает выраженный биоревитализирующий, увлажняющий кожу и иммунопротекторный эффект, за счет обновления клеточного пул и reparации имеющихся структурных повреждений в ДНК клеток. Стимулируется выработка коллагена, ламинина, фибронектина, эндогенной гиалуроновой кислоты. Стабилизация клеточных мембран способствует значительному снижению чувствительности клеток к повреждающему действию химических веществ и УФО, что приводит к нормализации меланогенеза и снижению выраженности существующих пигментных пятен.

Препарат имеет плотную гелевую текстуру, в связи с чем время его работы в тканях значительно дольше, чем у мезотерапевтических аналогов. Это позволяет применять его один раз в 3-4 недели (по показаниям), при этом количество процедур на курс уменьшается.

Содержание не перекрестно гиалуроновой кислоты в POLYDERM является необходимым буфером обмена для дезоксирибонуклеотидов, в то же время восполняет дефицит «родной» внутритканевой гиалуроновой кислоты и естественным образом разглашают появившиеся неровности и мелкие морщинки, защищают кожу от свободно-радикальных атак, фотоповреждения и тем самым также активно профилактируют старение всех слоев кожи.

Гель POLYDERM имеет ряд преимуществ при работе с тонкой деликатной кожей, несмотря на достаточно плотную текстуру препарата.

**Техника введения:** Интрандермальные папулы, а также трассирующая, линейная. Иглы: 30g 6mm 30g 13mm. Может использоваться как мезо имплантат для восстановления и разглаживания более глубоких морщин (носогубные складки, для припухлости увлажнения губ) который предаст легкий естественный объем.



# Lightfrost

КРЕМ ДЛЯ КОЖИ С АНЕСТЕЗИРУЮЩИМ ЭФФЕКТОМ

Комбинированный препарат для местного снижения неприятных ощущений на коже перед проведением различных косметологических процедур, в том числе и на чувствительной коже лица: эпиляции, проколы (пирсинг, включая проколы мочек ушей, татуаж, нанесение татуировок)

30 ml

400 ml



# ПРОТОКОЛЫ ПРОЦЕДУР

## PHILOSOPHY<sup>®</sup>

### ПРОТОКОЛЫ ПО МЕЗОТЕРАПИИ

Препарат	Техника введения	Дозировка	Рекомендованный курс
Revita Derm	Наппаж, мульти-пунктурная, папулы, линейная	2-3 мл. - лицо 4-6 мл. - лицо, шея, декольте	4 процедуры 1 раз в 7 дней, затем 2 процедуры 1 раз в 14 дней. Затем 3-4 процедуры 1 раз в месяц. Повторный курс через 6 мес.
DMAE	Срединный наппаж, мультипунктурная, микропапулы, линейная	3 мл. - лицо 6 мл. - тело	
Meso Hair	Наппаж, папулы, мульти-пунктурная	3-6 мл. - область волосистой части головы	10-14 процедур 1р. в 7дн., затем 4 процедуры 1р. в 14дн., затем 3-4 процедуры 1р. в мес. Повторный курс через 6 месяцев.
Lypo Complex	Инфильтрация	2-3 мл. - лицо 6-12 мл. - тело	4-6 процедуры 1р. в 14-21 дн. Повторный курс через 6-8 месяцев.
Amino Tonic	Наппаж,	3 мл. - лицо 6 мл. - лицо, шея, декольте	4 процедуры 1 раз в 7 дней, затем 2 процедуры 1 раз в 14 дней, затем 3-4 процедуры 1 раз в месяц.
Drainage	мульти-пунктурная,	3 мл. - лицо 6-12 мл. - тело	
Acne Treatment	папулы, линейная	3 мл. - лицо 6 мл. - лицо, шея, декольте, плечи, спина	Повторный курс через 6 мес.

### ПРОТОКОЛЫ ПО БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

	Основной курс	Поддерживающий курс	Рекомендованные концентрации
Профилактика и лечение	1 раз в 14 дней	1 процедура с интервалом в 3-4 недели	1% или 1,6% (в зависимости от толщины и состояния кожи)
Интенсивный курс	4 процедуры с интервалом в 14 дней	1 процедура ежемесячно	1,6% или 2% (в зависимости от толщины и состояния кожи)

#### Техника введения

Микроинъекционные внутридермальные папулы, линейная, коротко-линейная.

### ПРОТОКОЛЫ ПО БИОРЕГЕНЕРАНТАМ

Техника введения	Курс
Линейная	2-3 процедуры через 3-4 недели, Поддерживающая: 1 процедура в 3-6 месяца

## ПРОТОКОЛЫ ПО БИОРЕВИТАЛИЗАЦИИ

### Курс «АНТИСТРЕСС»

Инсоляция	Пилинг, дермобразия, пластическая операция	Контурная пластика	Радиоволновой лифтинг, фото- и лазерные системы
1 процедура за 2 недели до инсоляции, 1 после 2 недель	Подготовка к процедуре: 3 раза через 2 недели. Реабилитация: 3 раза через 2 недели	1 раз в 2 недели 3 раза до процедуры	После процедуры 1 раз в 2 недели

### Назначение БИОРЕВИТАЛИЗАНТОВ

Показания	Концентрация ГК Молекулярный вес	Зона применения	Общее число процедур	Частота процедур
Сухая тонкая кожа без видимых признаков старения	1%, 1 500 кДа	Лицо, шея, декольте, руки	2-3 процедуры	1 процедура в 2-3 недели
Нормальная кожа (25-35 лет) с минимальными признаками старения («гусиные лапки» при улыбке)	1.6% или 2.0%, 1 500 кДа	Лицо, шея, декольте, руки	2-4 процедуры	1 процедура в 3-4 недели
Сухая толстая кожа (35-45 лет) с видимыми признаками старения (статические морщины)	2.7% или 3.0%, 3 000 кДа	Лицо, шея, декольте, руки	2-3 процедуры	1 процедура в 3-4 недели
Нормальная кожа с признаками гравитационного потока («бульдожьи щеки»)	3.0% или 3.6%, 3 000 кДа	Лицо, шея, декольте, руки	2-3 процедуры	1 процедура в 3-4 недели

### Биоревитализант пролонгированного действия с глицеролом

Препарат	Техника введения	Дозировка	Рекомендованный курс
HYDRO ACTION	Линейная ретроградная, мультипунктурная, техника «решетки».	Количество введения препарата зависит от индивидуальных особенностей.	После первого введения препарата можно проводить 1 или 2 сеанса с интервалом в 3 недели на одну и ту же зону коррекции.

## ПРОТОКОЛЫ ПО БУСТЕРАМ С ПОЛИНУКЛЕОТИДАМИ

POLYDERM N1	Линейно-ретроградная, веерная, дермальных апексов, интрандермальная.	2 мл - лицо, 2 мл - шея, декольте.	1 процедура в 15-20 дней, курс 2 процедуры. Раз в 3 месяца поддерживающая процедура.
POLYDERM N1	Линейно-ретроградная, веерная, дермальных апексов, интрандермальная.	2 мл - лицо, 2 мл - шея.	1 процедура в 30 дней, курс 2 процедуры. 1 поддерживающая процедура раз в 3 месяца.

## ПРОТОКОЛЫ ПО ЖИДКИМ МЕЗОНИТАМ

FLUID THREAD	Для введения используются техники армирования.	6 мл на зону (либо лицо, либо кисти рук, либо декольте).	3-4 процедуры с шагом 1 месяц.
--------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	--------------------------------

# СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕПАРАТОВ **PHILOSOPHY<sup>®</sup>**

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СВОЙСТВ И ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕПАРАТОВ						
Препаратор	Назначение	Концен-трация	Связан-ность	Объем	Игла	Глубина введения
<b>ФИЛЛЕРЫ DIAMONDS</b>						
FINE LINES	Поверхностные и средние морщины	1.8% ГК (18 мг/мл)	7%	1 мл.	27G	Поверхностные слои дермы
DEEP	Средне-глубокие морщины, моделирование, объем	2.3% ГК (23 мг/мл)	9%	1 мл.	27G	Средние и глубокие слои дермы
ULTIMATE	Объемное моделирование, глубокие морщины	2.6% ГК (26 мг/мл)	14%	1 мл.	27G	Глубокие слои дермы
FACE DERM	Инъекционный имплант, интенсивное наполнение	2.6% ГК (26 мг/мл)	14%	1 мл.	27G	Глубокие слои дермы
<b>ФИЛЛЕРЫ С МАННИТОЛОМ (45 мг/мл) SOLIDERME</b>						
SOLIDERME 2	Поверхностные морщины	2.0% ГК (20 мг/мл)	9%	1 мл.	27G	Средние, глубокие слои дермы
SOLIDERME 4	Вolumетрическая коррекция, заполнение морщин	2.4% ГК (24 мг/мл)	9%	1 мл.	27G	Глубокие слои дермы
<b>ФИЛЛЕР ДЛЯ ИНТИМНОЙ ПЛАСТИКИ</b>						
DIAMONDS LABIADERM	Для восполнения объемов и коррекции интимных зон	2.3% ГК (23 мг/мл)	9%	1 мл.	27G	
<b>БИОКАРКАС</b>						
Ecladerme FACE 14	Лицо, кисет, контур губ, марионетки	1.4% ст.ГК/1.0% не ст.ГК	5%	1.6 мл.	30G	Эпидермис и поверхности слои дермы
Ecladerme NECK 10	Носослезные борозды, шея, декольте, руки	1.0% ст.ГК/1.0% не ст.ГК	5%	1.6 мл.	30G	Глубокие слои дермы
<b>БИОРЕПАРАНТ</b>						
Regulator Forte	Увлажняющий комплекс с аминокислотами и пептидами	1.6% не ст.ГК	нет	1.6 мл.	30G	В дерму

## СВОЙСТВА ФИЛЛЕРОВ И БИОКАРКАС

Препарат	Молекулярный вес	Динамическая вязкость	Оsmотическое давление	BDDE	Эндотоксины	pH
DIAMONDS Fine Lines	3 000 кДа	~700 000 мПа·с	300 мОсм/кг	0.3 ppm	< 0,5 EU/мл	7.1
DIAMONDS Deep	3 000 кДа	~800 000 мПа·с	300 мОсм/кг	0.4 ppm	< 0,5 EU/мл	7.1
DIAMONDS Ultimate	3 000 кДа	~1000 000 мПа·с	291 мОсм/кг	0.53 ppm	< 0,5 EU/мл	7.1
DIAMONDS Face Derm	3 000 кДа	~1000 000 мПа·с	291 мОсм/кг	0.53 ppm	< 0,5 EU/мл	7.1
SOLIDERME 2	3 000 кДа	~1000 000 мПа·с	291 мОсм/кг	0.53 ppm	< 0,5 EU/мл	7.3
SOLIDERME 4	3 000 кДа	~1200 000 мПа·с	291 мОсм/кг	0.53 ppm	< 0,5 EU/мл	7.2
DIAMONDS LABIADERM	3 000 кДа		300 мОсм/кг	0.4 ppm	< 0,5 EU/мл	7.1
ECLADERME Face 14	3 000 кДа	~550 000 мПа·с	280 - 330 мОсм/кг	0.2 ppm	< 0,5 EU/мл	7.2
ECLADERME Neck 10	3 000 кДа	~550 000 мПа·с	280 - 330 мОсм/кг	0.2 ppm	< 0,5 EU/мл	7.3
REGULATOR FORTE	3 000 кДа	нет	280 - 330 мОсм/кг	нет	< 0,5 EU/мл	7.4

### СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ISO 13485:2015



### СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ ПРЕПАРАТОВ

#### PHILOSOPHY® Professional Skincare Solutions






# ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ГИАЛУРОНОЙ КИСПОТЫ PHILOSOPHY™



## ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ



**Елена ПРОКОПОВА**  
дерматолог,  
косметолог,  
физиотерапевт,  
тренер компании  
ProfMedGroup

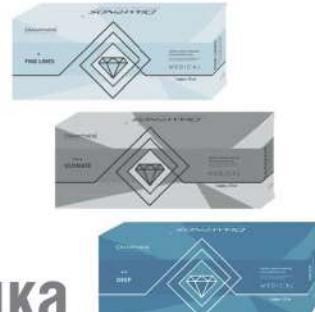

# Коррекция ложной прогнатии подбородка с помощью филлеров Diamonds

Недостаточный объем подбородка делает лицо непропорциональным, а овал нечетким. Если раньше с этой проблемой можно было справиться только путем установки небиодеградируемого импланта, то теперь на помощь приходит контурная пластика, особенно в случае наличия ложной прогнатии. Для устранения дефекта в подбородочную область вводят достаточно вязкие филлеры, которые должны обладать хорошими эластическими свойствами и быть пластичными.

Для воссоздания гармоничного овала лица необходимо следовать стандарту «золотого сечения». Кроме того, верхняя, средняя и нижняя трети должны быть пропорциональны относительно друг друга (рис. 1). Если какая-то часть меньше других, то и ее сагиттальный размер также меньше при визуальной оценке лица как анфас, так и в профиль.

Рассмотрим одну из причин дефицита объема нижней трети лица и способ его коррекции.

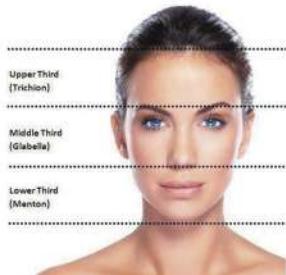


РИС. 1. Пропорции лица

Самая объемная часть в нижней трети лица — подбородок. Его размер зависит от костной основы нижней челюсти, степени развития подбородочных бугров, объема подбородочной мышцы (*m. mentalis*) и соотношения верхней и нижней челюстей. Ориентируясь на эти параметры, выделяют истинную и ложную прогнатию (дистальный прикус), относящуюся к аномалиям прикуса и характеризующуюся несоответствием верхней и нижней челюстей в сагиттальном направлении.

Истинная прогнатия отличается чрезмерным развитием верхней челюсти. При этом передние верхние зубы выдвинуты вперед, выстоят из-под верхней губы и часто прикусывают нижнюю губу.

Однако гораздо чаще встречается ложная прогнатия, которая обусловлена недоразвитием или слишком глубоком расположением нижней челюсти.

При выборе препарата, схемы и способа коррекции необходимо учитывать все анатомические ориентиры, асимметрию, а также индивидуальные особенности лица пациента в целом.

Прежде всего нужно провести пробу Эшлера-Биттерна. Сначала пациента просят привыкнуть сокнуть зубы, и врач оценивает его профиль. Затем предлагают выдвинуть нижнюю челюсть вперед до прямого смыкания верхних и нижних резцов. Если нижняя треть лица приобретает при этом необходимые пропорции, то аномалия обусловлена недоразвитием нижней челюсти: это ложная прогнатия. При ухудшении характеристик профиля причина аномалии заключается в чрезмерном размере верхней челюсти и ее зубного ряда: это истинная прогнатия.

Для визуального устранения ложной прогнатии одним из быстрых и эффективных методов коррекции считается введение

в подбородочную область монофазных филлеров *Diamonds Deep* и *Diamonds Ultimate* (Dr. Korman lab., производство — Израиль) на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты.

Ассортимент препаратов для контурной пластики:

- Diamonds Fine Lines 18 мг/мл;
- Diamonds Deep 23 мг/мл;
- Diamonds Ultimate 26 мг/мл;
- Facederm 26 мг/мл.

Применение этих филлеров, обладающих высокими показателями вязкости и при этом довольно пластичных, позволяет получить выраженный волюмизирующий эффект, воссоздать нужную форму подбородка с учетом конкретных недостатков в этой области.

Для оценки степени недостаточности объема подбородка нужно провести разметку по методу M. Gonzalez-Ulloa. При этом при оценке лица в профиль (линия M. Gonzalez-Ulloa, (рис. 2) отмечается отставание подбородка назад, вследствие чего лицо кажется непропорциональным, недоразвитым в нижней своей части. Одно из важных условий — наличие зубов. Перед

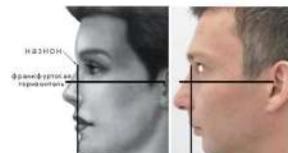


РИС. 2. Оценка степени недостаточности объема подбородка по методу M. Gonzalez-Ulloa



Пациентка К., 35 лет, до и после проведения коррекции ложной прогнатии подбородка 1-й степени с помощью филлеров Diamonds

процедурой обязательно проводится фотографирование анфас и в профиль.

Выделяют три степени недостаточности подбородочной области, в зависимости от которой определяют объем филлера, необходимый для оптимальной коррекции:

- \* при 1-й степени недостаточность мягких тканей может составлять до 1 см, необходимый объем филлера – 1 мл;
- \* при 2-й степени – дефицит около 1,5 см, необходимый объем филлера в среднем 2 мл;
- \* при 3-й степени – недостаточность около 2 см и более, объем филлера – порядка 3,0 мл.

#### Случай из практики

Пациентка К., 35 лет. Обратилась в клинику с жалобой на наличие слезных борозд, дефицит объема в средней трети лица и подбородочной области. При сборе анамнеза и визуальном осмотре был выявлен дефицит объема подбородочной области. К коррекции данной зоны ранее пациентка не прибегала. Стоматологических аномалий развилия не выявлено.

При проведении пробы Эшлера-Биттера пациентке был поставлен диагноз: ложная прогнатия 1-й степени (фото до процедуры).

Было назначено введение филлера на основе стабилизированной гиалуроновой кислоты в зону подбородка. При визуальной оценке недостатка объема подбородочной области было проведено фотографирование пациентки анфас и в профиль по методу González-Ulloa (рис. 2) путем проведения горизонтальной линии через назис и вертикальной линии перпендикулярно низу.

Расстояние между самой выступающей точкой подбородка и опущенным перпенди-

куляром определяет отсутствие или наличие (а также степень) недостатка объема подбородочной зоны. Затем пациентку попросили напрячь подбородок с целью определения границ и размера подбородочной мышцы, что позволяет выявить корректируемую зону.

После разметки был введен монофазный филлер Diamonds Ultimate (концентрация ГК – 26 мг/мл), который сразу позволяет получить максимальный объем, в то время как риск постпроцедурного отека и миграции филлера в будущем минимален. Коррекция проводилась с помощью иглы 27G и использованием болясной техники.

Визуально каждое брюшко подбородочной мышцы делает пополам, ввод иглы осуществляется чуть ниже середины разметки, перпендикулярно, углубляясь до надкостницы. После этого постепенно вводят препарат, создавая объемный болюс. Во время коррекции необходимо внимательно следить за равным объемом вводимого филлера с обеих сторон от мышцы, учитывая асимметрию.

Для правильного распределения объема болюсы делают пирамидально, что создает необходимую высоту подбородка и выдвигает его вперед и вниз. После введения первой порции препарата проводят моделирующий массаж и оценивают изменения в корректируемой зоне. Для равномерного наполнения мягких тканей и во избежание формирования между брюшками подбородочной мышцы проводят вводят небольшой объем филлера в борозду между правой и левой половинками подбородочной мышцы. Проводят моделирующий массаж.

Для создания красивой линии подбородка и нижней челюсти остатки филлера распределяются по нижнечелюстной линии, применив линейную технику.

Сразу после объемного моделирования с использованием препарата Diamonds Ultimate было проведено фотографирование и оценка результата коррекции.

**Результат:** введение всего 2 мл филлера позволило устранил недостаточность объема подбородка 1-й степени и получить красивую линию нижней челюсти (фото после процедуры). Волюмирующий эффект усиливается через 2 недели после процедуры за счет притягивания влаги к корректируемой зоне и достижения желаемой формы подбородка. Следует учесть, что при использовании большого объема филлера может развиться посттравматический отек, что удлинит период реабилитации. Правильнее назначить повторную коррекцию через 2 недели.

Пациентке скорректировали скучловую зону и овал лица с помощью канюльного введения филлеров diamonds face в объеме 2мл.

Заполнили депрессию в области слезной борозды канюлей, введя филлер diamonds deep в объеме 0,5 мл, так же в область носогубной складки, введено 0,5 мл филлера diamonds deep с помощью иглы.

#### ВЫВОДЫ

Пациентке был введен филлер Diamonds Deep в объеме 1 мл в область носогубной складки и область слезной борозды.

В область скучловой зоны имплантировалось 2 мл филлера Diamonds Ultimate.

В область подбородка также было введено 2 мл филлера Diamonds Ultimate.

Таким образом, был восполнен объем в скучловой зоне, заполнена слезная борозда и устранена ложная прогнатия подбородочной области.

professional trichology

PMG GROUPS®

ALFA BLOCK SHAMPOO WITH 1% KOPYRROL  
ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС С 1% KOPYRROL

PH 5.0-6.5 with 1% Копиррол 150 мл



Мягкое очищение;  
Восстановление волосальных фолликулов и структуры волос.

ПРЕПАРАТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

PH 4.0-5.0 with 2% KOPYRROL 100 мл



Укрепляет волосы от корней;  
Увеличивает плотность и густоту волос.

TREATMENT



ALFA BLOCK LOTION WITH 5% KOPYRROL FOR HIM  
Лосьон против выпадения волос с 5% KOPYRROL  
ДЛЯ НЕГО

PH 4.0-5.0 with 5% KOPYRROL 100 мл



Укрепляет волосы от корней;  
Увеличивает плотность и густоту волос.

KOPYRROL





## CATALOG

**Professional  
injection**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ИНЪЕКЦИОННАЯ  
КОСМЕТОЛОГИЯ

Главный офис Professional Medical Group  
г.Москва, ул.Маломосковская 22, оф. 106  
Отдел продаж:

+7 (499) 553 77 01,  
+7 (915) 167 60 60,  
+7 (968) 775 27 79

Отдел регионального развития и Дистрибуции  
+7 (916) 357 60 60,  
+7 (916) 337 60 60

Обучающий центр:  
+7 (968) 775 26 50

Представительство в Крыму:  
Симферополь, ул. Некрасова 17/1 оф.18  
+7 (978) 769 91 00

Представительство ProfMedGroup в СПб  
ул. Варшавская, 19, кор. 2, кв. 1  
+7 (963) 312 85 82

Академия последипломного образования "GC"  
+7 (968) 909 93 92

Украина:  
+38 (048) 722 43 22, +38 (066) 527 97 38  
+38 (096) 741 03 71, +38 (063) 013 35 00